

Обогреватель бытовой электрический ОНЭ-3-40/220 ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Сапог с подогревом ИНКОР ОНЭ-3-40/220 позволяет согреть и расслабить все тело. Их применение интенсифицирует кровообращение в затвердевших участках мышц и улучшает самочувствие после тяжелого дня. Перед отходом ко сну отключайте изделие от сети! Сапог с подогревом оснащен четырехпозиционным проходным переключателем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В _____ 220
Род тока _____ переменный
Температура нагрева поверхности при положении переключателя: (2) сильный нагрев, С _____ 45-55
(1) слабый нагрев, С _____ 25-40
Номинальная частота, Гц _____ 50
Потребляемая мощность, Вт _____ 40
Класс защиты поражения током _____ 2
Степень защиты от влаги _____ влагостойкие
Драгоценных металлов не содержит.
Артикул _____ 78003
Вес _____ прилб. 500 г.
Размеры _____ прилб. 25x30x30 см.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обогреватель _____ 1 шт.
Паспорт и ИЭ _____ 1 экз.
Упаковка _____ 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ допускается:

- оставлять включенный обогреватель без надзора;
- втыкать в обогреватель металлические или иные предметы;
- разбирать изоляционные чехлы и переключатели;
- подвергать обогреватель воздействию влаги или ударам твердыми предметами;
- эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а так же при поврежденном проводе или выключателе;
- включать мокрый обогреватель;
- эксплуатировать обогреватель в свернутом положении;
- применять для беспомощных лиц, детей или лиц, не чувствительных к теплу, инвалидов без присмотра;

- машинная стирка;
- замену эл. шнура самостоятельно не производить;
- Продолжительное применение изделия в положении переключателя «2» может привести к ожогу кожи.
- Потребитель не должен засыпать при включенном приборе.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подготовку обогревателя к работе необходимо проводить в следующем порядке:
- установить выключатель в положении «0» и включить грелку в сеть;
 - установить выключатель в положении «2» на 15-20 минут для разогрева;
 - после разогрева установить выключатель в положении «1»;
 - в случае сильного разогрева обогреватель отключить от сети.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- хранить обогреватель при комнатной температуре в месте, защищенном от паров кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45°C до +45°C;
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения, при обнаружении прекратить использование изделия.
- допускается отклонение от заданных размеров ± 5 см
- габаритные размеры 25x30x30 см.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляет изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина.
При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть.
Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате небрежного хранения, несоблюдения правил эксплуатации, разборки и ремонта обогревателя покупателем.
Средний срок службы 5 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание серьезных персональных травм и причинения материального ущерба, Вы, должны выполнять следующее:
- никогда не втыкайте в изделие булавки — инородный металлический предмет может замкнуть электроцепь изделия, что, в свою очередь, может привести к пожару;
- никогда не используйте изделие в мокром состоянии, наличие влаги может привести к замыканию электроцепи;
- никогда не оставляйте изделие без присмотра — аварийные перепады напряжения в сети могут привести к замыканию электросети и выходу изделия из строя;
- при наличии заболеваний, при которых использование тепла противопоказано, посоветуйтесь с врачом;
- **никогда не используйте изделие в положении «2» более 30 минут;**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель низкотемпературный электрический ОНЭ-3-40/220 соответствует ГОСТ 52161.2.17-2009 техническим условиям ТУ-3468-001-40720744-97. Сертификат соответствия №РОССТУ. АВ 72. В03238. Адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10
Тел.: 8 (812) 247-67-13; 8 (911) 297-96-54; 8 (911) 252-89-49
www.inkorspb.ru, e-mail: inkor.spb@mail.ru

Дата выпуска « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп ОТК

Цена договорная

Продан « _____ » _____ 20 ____ г.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ОНЭ-3-40/220

Продан магазином _____

(наименование и номер магазина, его адрес)

дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

штамп магазина _____

(личная подпись продавца)

выполнены работы _____

Исполнитель _____ Владелец _____