



**Инструкция по подключению тонометра
UA-911BT(и весов UC-911BT)
к мобильному приложению
MyFitnessCompanion, работе с мобильным
приложением MyFitnessCompanion и порталом
(для смартфонов с ОС Android)**






Содержание

1. Поиск мобильного приложения MyFitnessCompanion в Google Play Store (Play Market).....	3
2. Установка программы MyFitnessCompanion.....	4
3. Включение Bluetooth	5
4. Начало работы с MyFitnessCompanion.....	6
5. Главное окно мобильного приложения MyFitnessCompanion.....	7
6. Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT).....	8
7. Результаты работы прибора и программы после измерений.....	10
8. Просмотр обучающих видео.....	11
9. Подключение к portalу Health Vault.....	12




1. Поиск мобильного приложения MyFitnessCompanion в Google Play Store (Play Market)

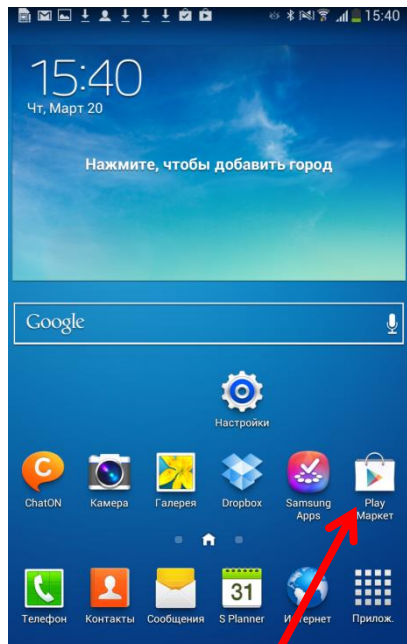


Открываем
приложение
Play Маркет

1

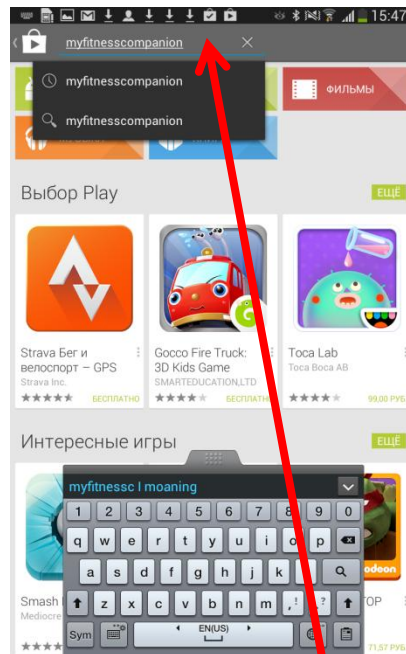

В поисковой строке набираем
название программы
MyFitnessCompanion

2

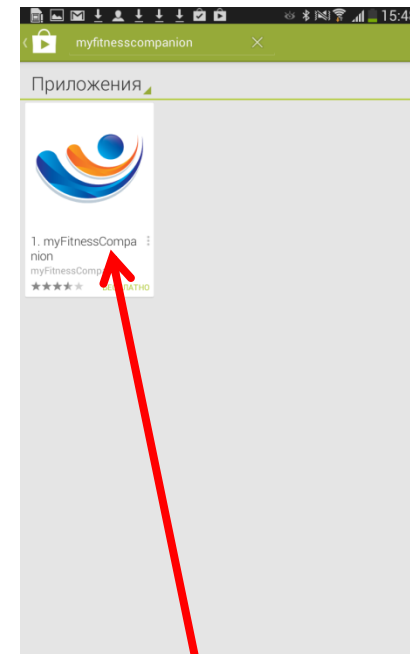

Выбираем установку приложения
MyFitnessCompanion.
ВАЖНО!


Если у Вас не появился значок
приложения MyFitnessCompanion, то
модель версии смартфона не
поддерживает данное приложение.

3




2. Установка программы MyFitnessCompanion

AND
Эй энд Ди, Япония

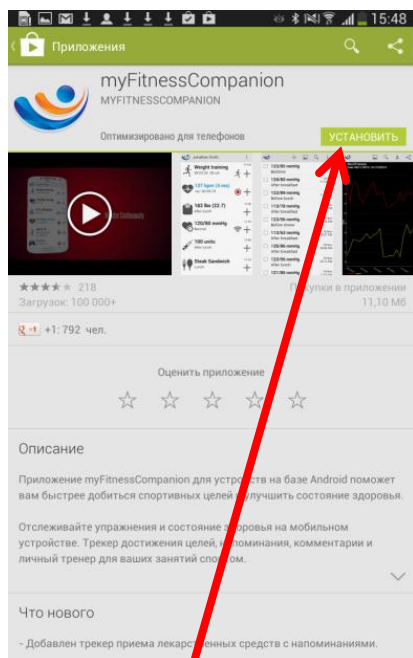


Выбираем пункт «Установить»

1

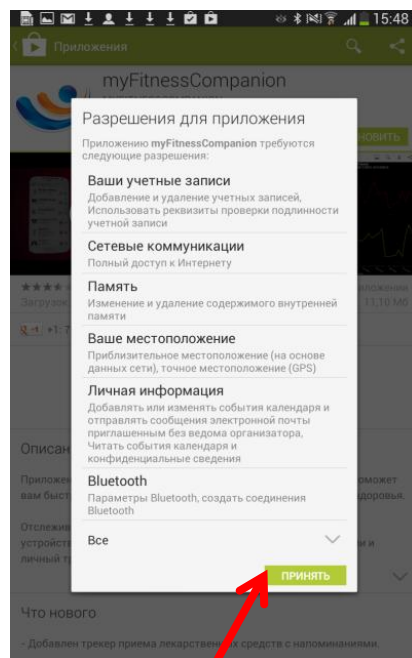


Play Market предлагает Вам принять разрешения для приложения. Выбираем пункт «Принять»

2

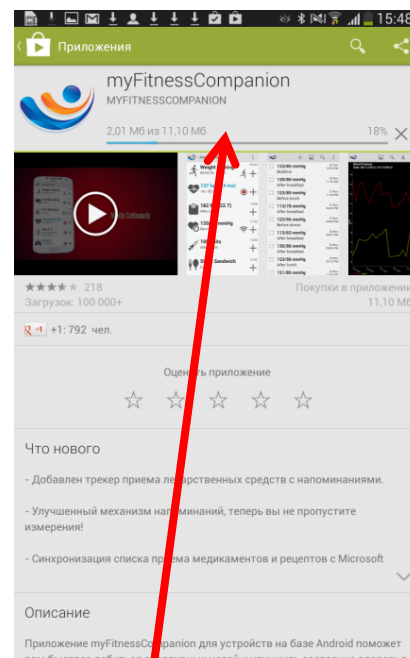

Начинается загрузка приложения

3

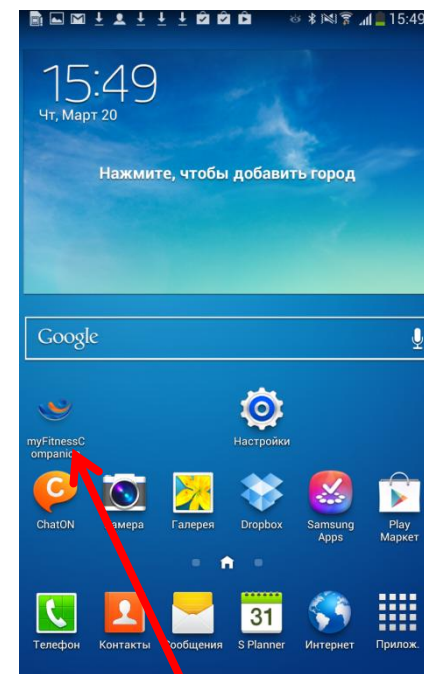


По окончании загрузки на рабочем столе телефона, должен появиться ярлык приложения MyFitnessCompanion

4




3. Включение Bluetooth

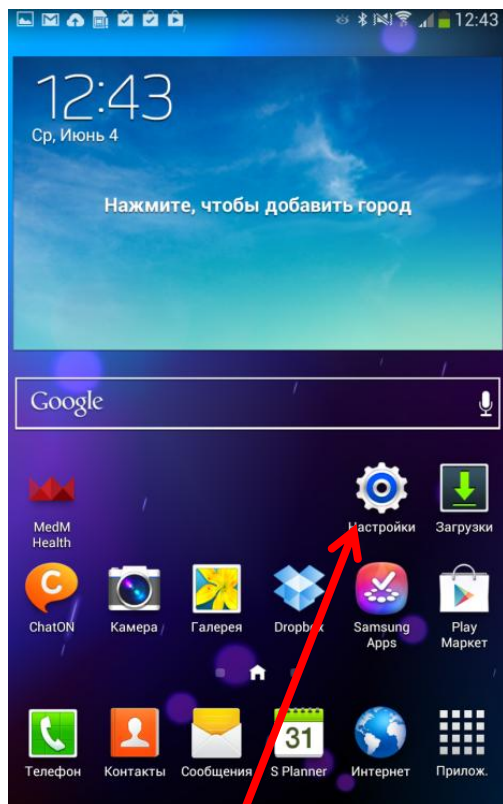


Заходим в пункт
«Настройки»

1

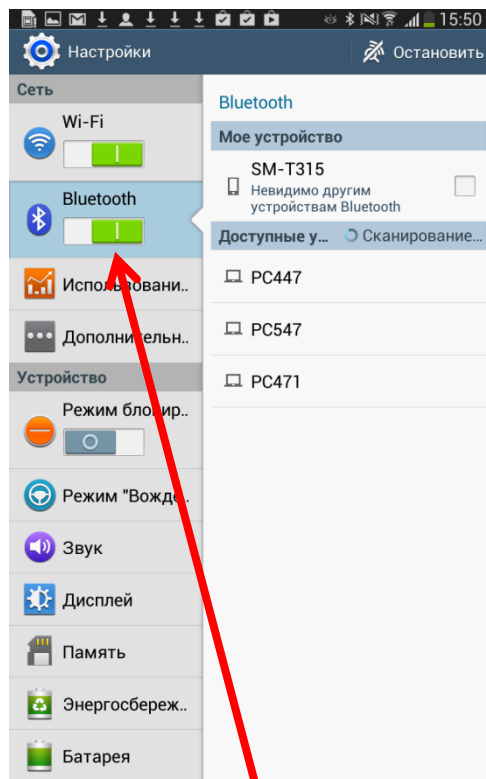

Делаем индикатор
Bluetooth активным

2

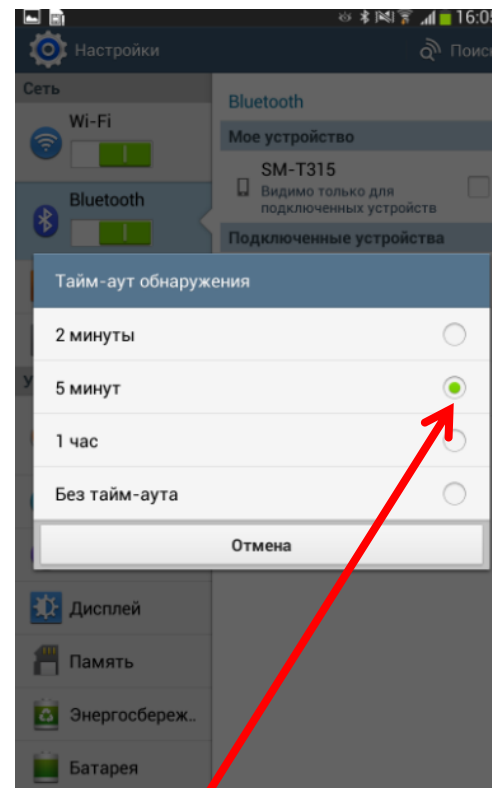


Для обеспечения надежности сопряжения
тонометра со смартфоном установим Тайм-
Аут обнаружения на минимум 5 минут. Для
этого необходимо нажать кнопку «Меню»
на Вашем смартфоне, выбрать пункт
«Тайм-аут обнаружения» и поставить
галочку на 5 минут

3




4. Начало работы с MyFitnessCompanion

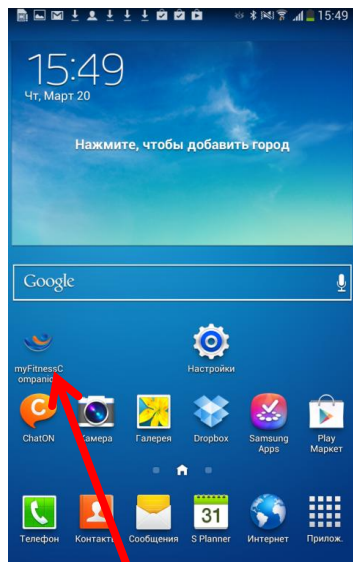


Запускаем приложение MyFitnessCompanion

1

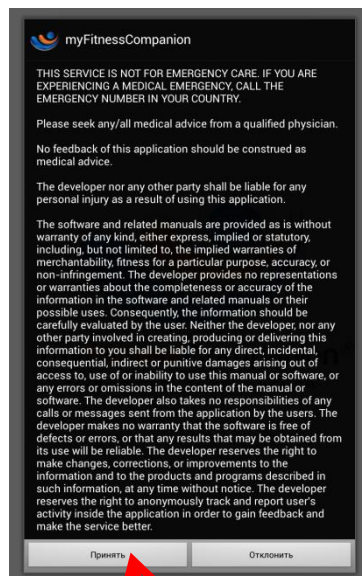


Для подтверждения лицензионных прав разработчиков выбираем пункт «Принять»

2

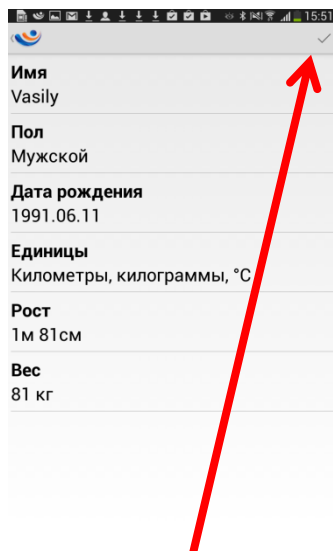


В окне «Персональные данные» в пустых строках вводим необходимую информацию и жмем галочку «Сохранить»

3

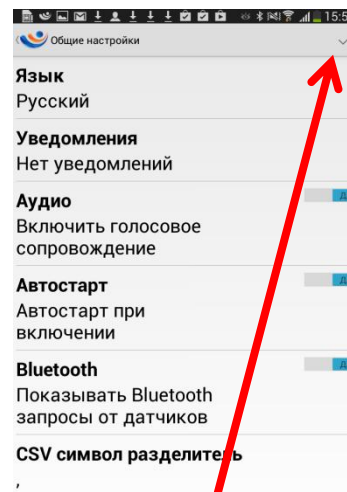

В окне «Общие настройки» выбираем необходимые Вам параметры и жмем галочку «Сохранить»

4

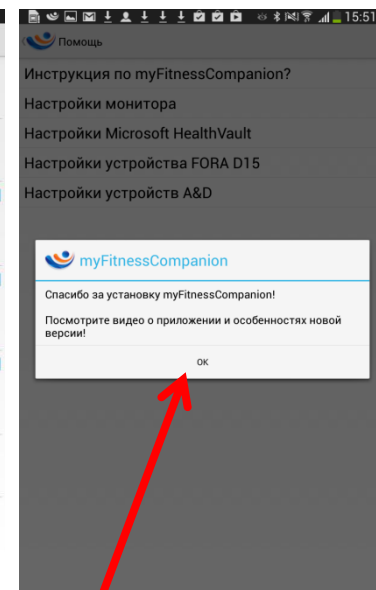


Программа MyFitnessCompanion готова к работе. После нажатия кнопки «Ок» Вы оказываетесь в окне «Помощь» где можете просмотреть обучающие видео на английском языке

5



5. Главная окно мобильного приложения MyFitnessCompanion

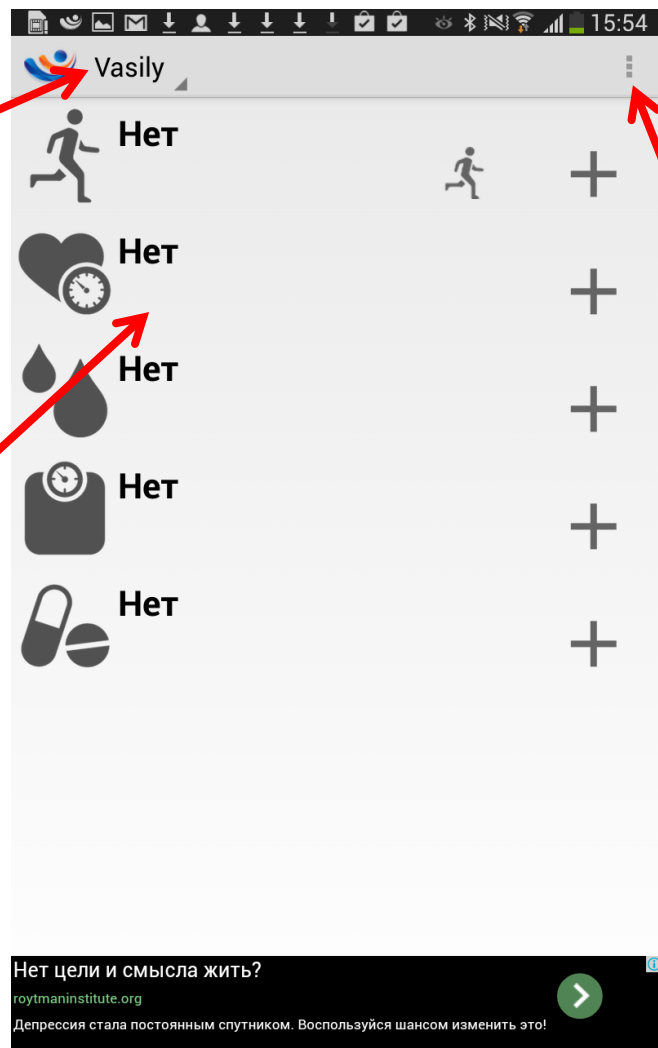

Учетная запись
пользователя


Просмотр измерений
и свойств прибора

Меню настроек
программы




6. Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT)

AND
Эй энд Ди, Япония

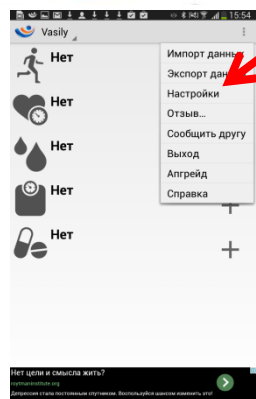


В разделе
«Меню»
выбираем
пункт
«Настройки»

1

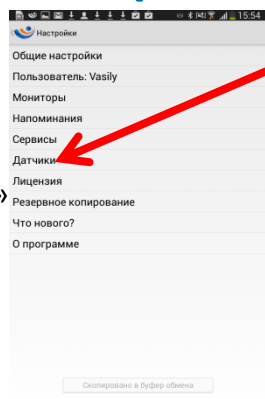


В разделе
«Настройки»
выбираем
пункт
«Датчики»

2

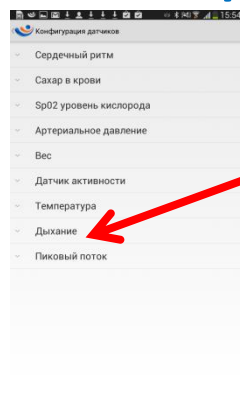


В разделе
«Конфигурация
датчиков»
выбираем
пункт
«Артериальное
давление»

3

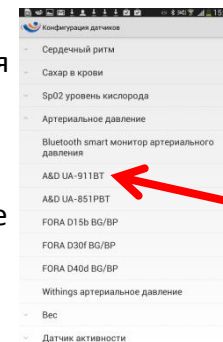


Из списка
выбираем прибор
A&D UA-911BT

4

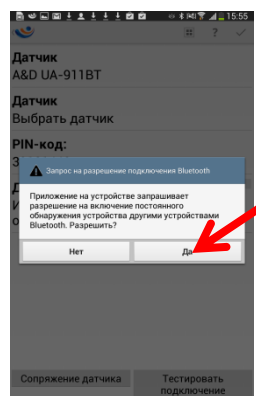

В окне
«Запрос на
разрешение
подключения
Bluetooth»
нажимаем
кнопку «Да»

5

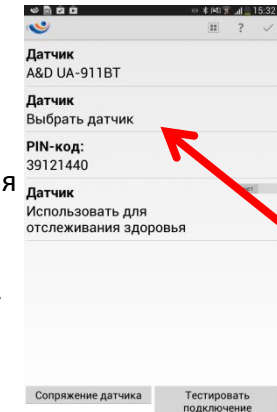


В меню
прибора
выбираем
пункт
«Датчик»

6




На обратной стороне
тонометра находим
идентификационный
номер прибора

7

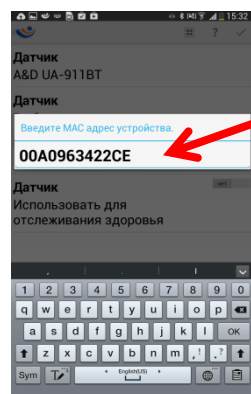

В открывшемся окне
пишем
идентификационный
номер прибора

8

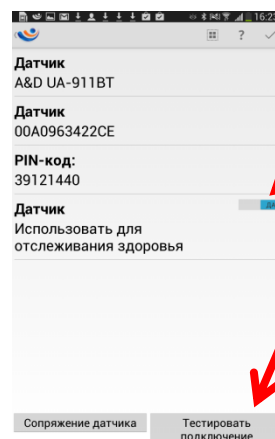


Ставим кнопку «Датчик.
Использовать для отслеживания
здоровья» в положение Да. После
этого необходимо произвести
измерение на тонометре. По
окончанию измерения сразу
нажимаем пункт «Тестировать
подключение»

9




Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT)

AND
Эй энд Ди, Япония

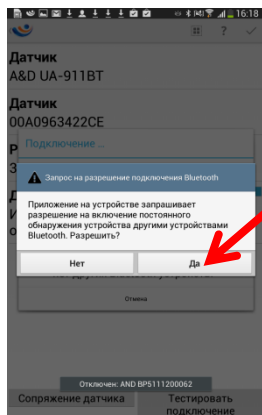


Подтверждаем запрос на включение модуля Bluetooth на приборе.

10

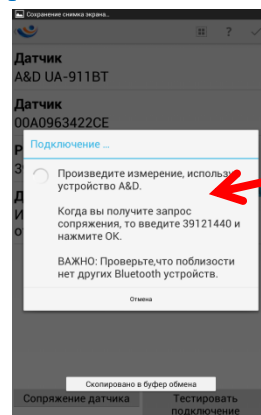


Ожидаем около 2х минут пока программа не добавит Ваш тонометр. В процессе подключения прибора смартфон может выдать сообщение «Прибор подключен» и «Прибор Отключен». Вне зависимости от вида сообщений ожидаем подключения без действий. Программа подключит тонометр автоматически. Если программа сделает запрос о вводе пароля, в строке ввода набираем 39121440.

11

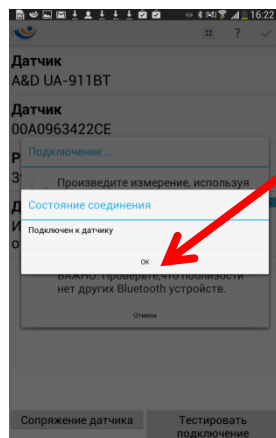

В случае успешного подключения прибора автоматически появится окно «Подключен к датчику»

12

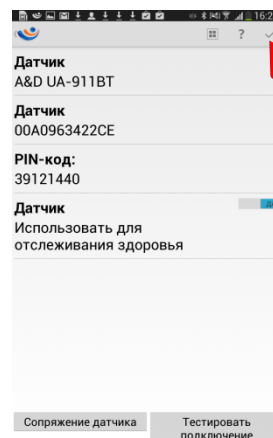


После подключения прибора к телефону выбираем пункт «Сохранить». После этого данные с тонометра после измерения будут автоматически приходить на Ваш смартфон. Так же в настройках Вы сможете настроить голосовое оповещение результатов измерений. В случае отсутствия подключения, попробуйте повторить все с 1 шага

13




7. Результаты работы прибора и программы после измерений

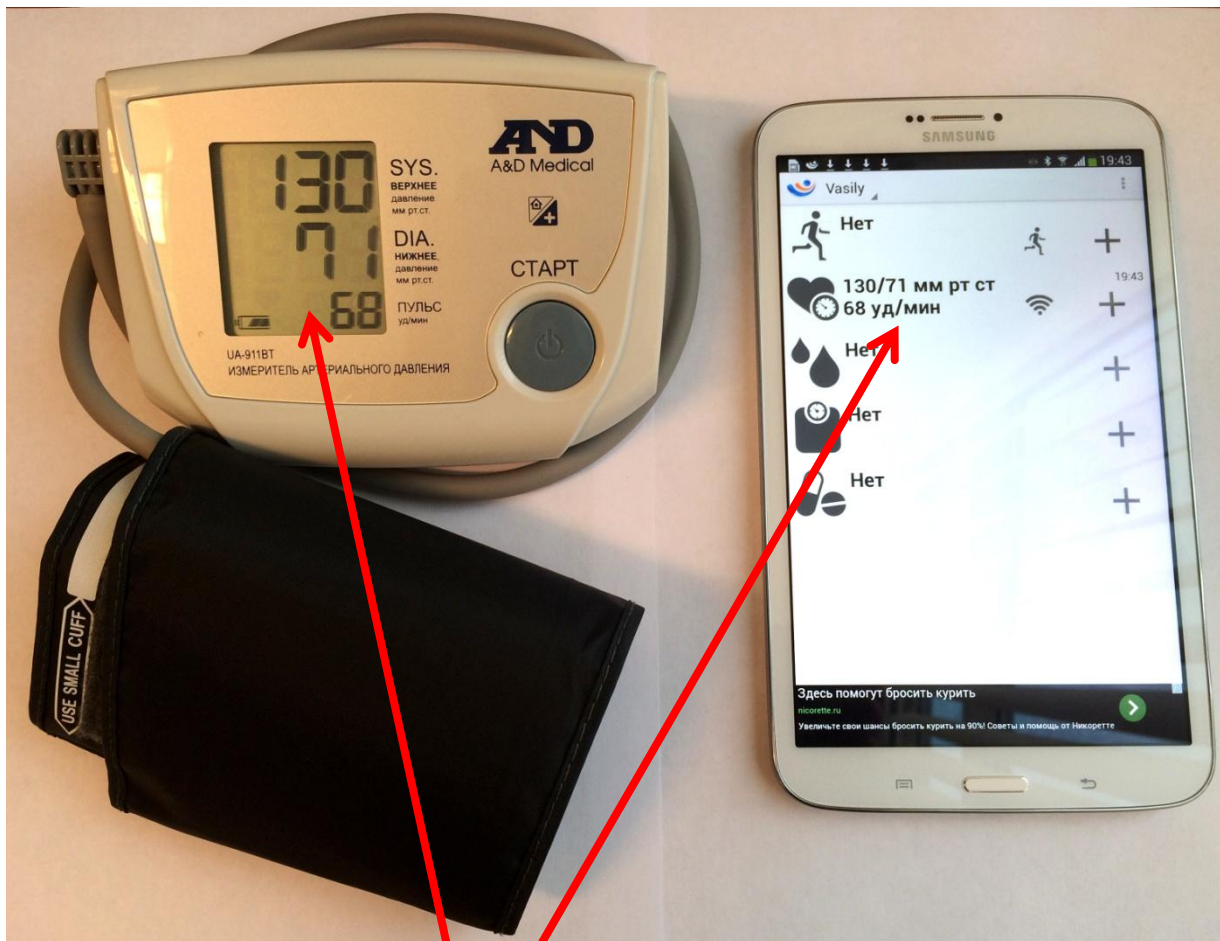


Передача данных с
прибора на телефон

8. Просмотр обучающих видео

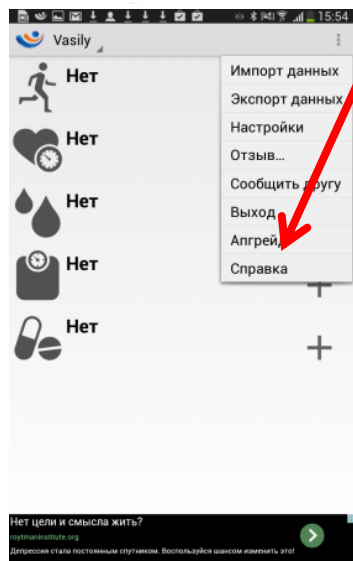

Фрагменты обучающего видеоролика по установке

3

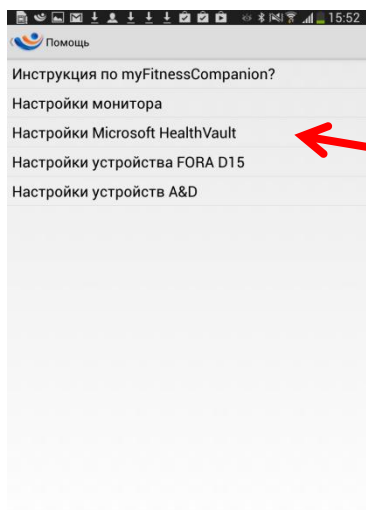



9. Подключение к порталу Health Vault

